

Auto SLIDE®



The ORIGINAL Slide and turn cushion for Auto SEAT

PAT.1996 000 95/ VR 2002 041 41

PAT.PEND/BA 201100001/Europapatent

Den **ORIGINALE** Auto SLIDE er registrert i **Dansk Patent- og Varemærkestyrelse**.
Produktet leveres kun av Master CARE.



- Art. nr. 35601
Auto SLIDE®
Model: TURNER Medium AIR
Størrelse: L 48 x B 48 cm
Antall håndtak: 0



- Art. nr. 17994
Auto SLIDE®
Model: BACK Medium AIR
Størrelse: L 48 x B 48 cm
Antall håndtak: 2



- Art. nr. Leveres ikke i Norge
Auto SLIDE®
Model: SEAT Medium AIR
Størrelse: L 48 x B 48 cm
Antall håndtak: 2

- Art. nr. 38985
Auto SLIDE®
Model: TUNER Large AIR
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antall håndtak: 0

- Art. nr. 38950
Auto SLIDE®
Model: BACK Large AIR
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antall håndtak: 2

- Art. nr. Leveres ikke i Norge
Auto SLIDE®
Model: SEAT Large AIR
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antall håndtak: 2

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !


Auto SLIDE®



The ORIGINAL Slide and turn cushion for Auto SEAT


BRUKERVEILEDNING

A. Auto SLIDE® Model: TURNER (Montering)

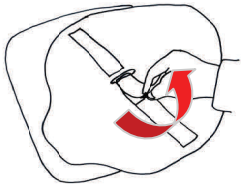


1

Auto SLIDE® TURNER er ved levering innstilt til å rotere. For å gjøre den mer anvendelig skal du åpne borrelåsen på undersiden av Auto SLIDE® og innstille den etter behov.

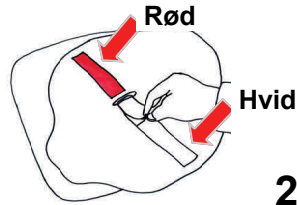

2

Anvendes Auto SLIDE® på føreriset, skal borrelåsen festes på "HVID". Anvendes Auto SLIDE® på passasjeriset, brukes "RØD" borrelås. Dette for at selen ikke skal folde seg under puten.

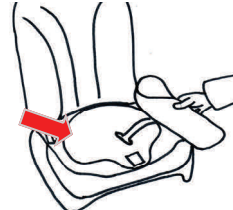

3

Auto SLIDE® plasseres på bilsetet. Den nederste glidedel plasseres på bilsetet. Den øverste glidedel føres ut til kanten av setet.



4

Auto SLIDE® TURNER er nå klar til bruk.

B. Auto SLIDE® model: TURNER (Anvendelse)




5

Ved bruk av Auto SLIDE® TURNER kan du sette deg på kanten av setet. Når etiketten "FASTEN SEAT BELT" er mellom dine ben, sitter du korrekt plassert.




6

Gli bakover inn mot midten av setet, roter og gli deg inn mot seteryggen.

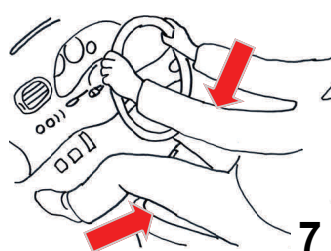

7


Hjørnerne på den nederste glideputen er kuttet av. Dette fører til, at Auto SLIDE® låser mot setet, når du legger vekten på forkant av setet med dine lår. Dermed unngår man å skli rundt på setet under kjøring.

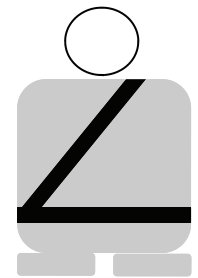

ADVARSEL / WARNING


Man **SKAL** alltid bruke sikkerhetssele når man kjører med Auto SLIDE®.

C. Auto SLIDE® model: BACK (Montering)

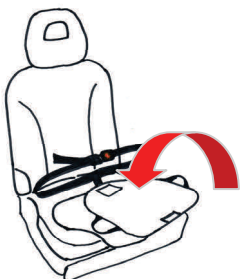

1

Plasser Auto SLIDE® BACK på bilsetet med den minste glidedel nederst. Den øverste glidedel, som du sitter på, plasseres slik at selen vender inn mot seteryggen.

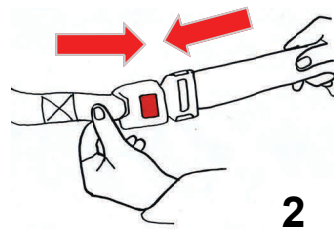

2

Åpne låsespennen på selen og før begge ender rundt bak seteryggen. Fastgjør og stram passende til.



3

Auto SLIDE® er nå montert.

Auto SLIDE® CE

The ORIGINAL Slide and turn cushion for Auto SEAT

BRUKERVEILEDNING

D. Auto SLIDE® model: BACK (Anvendelse)




4

Drei den øverste glidedelen diagonalt ut mot kanten av setet og sett deg ned på denne. Du sitter korrekt, når du kan se etiketten "FASTEN SEAT BELT" mellom dine ben.




5

Nå kan du dreie og gli deg på plass i bilsetet etter behov.

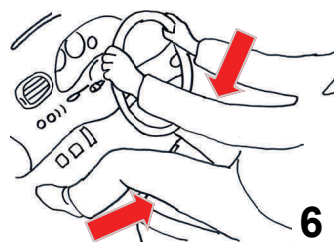

6


Hjørnerne på den nederste glideputen er kuttet av. Dette fører til, at Auto SLIDE® låser mot setet, når du legger vekten på forkant av setet med dine lår. Dermed unngår man å skli rundt på setet under kjøring.

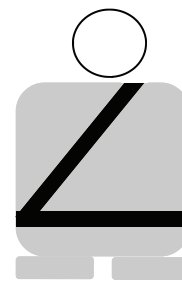

ADVARSEL / WARNING


Man **SKAL** alltid anvende sikkerhetssele, når man kjører med Auto SLIDE®.

E. Auto SLIDE® model: SEAT (Montering)

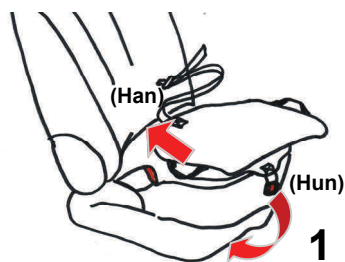

1

Plasser Auto SLIDE® SEAT på bilsetet med den minste glidedel nederst. Åpne låsespennen på den nederste glidedelen og før (Han) spennen inn mellom sete og seteryggen. La (Hun) spennen henge på forkant av setet.

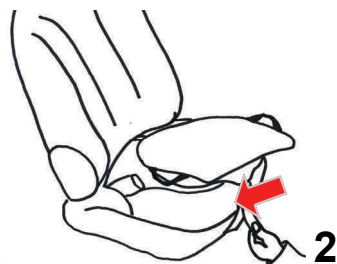

2

Før (Han) spennen ned under bilsetet og ut mot forkant mot (Hun) spennen. Fastgjør låsespennen i forkant av setet og stram passende til.



3

Auto SLIDE® er nå montert.

F. Auto SLIDE® Model: SEAT (Anvendelse)




4

Drei den øverste glidedelen diagonalt ut mot kanten av setet og sett deg ned på denne. Du sitter korrekt, når du kan se etiketten "FASTEN SEAT BELT" mellom dine ben.




5

Nå kan du dreie og gli deg på plass i bilsetet etter behov.

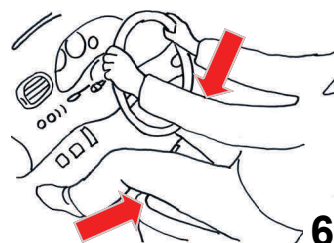

6

Hjørnerne på den nederste glideputen er kuttet av. Dette fører til, at Auto SLIDE® låser mot setet, når du legger vekten på forkant av setet med dine lår. Dermed unngår man å skli rundt på setet under kjøring.

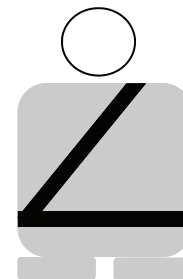

ADVARSEL / WARNING

Man **SKAL** alltid anvende sikkerhetssele når man kjører med Auto SLIDE®.

Auto SLIDE®



The ORIGINAL Slide and turn cushion for Auto SEAT

Beskrivelse av de forskjellige modellene:

(1) Auto SLIDE® TURNER AIR

Består av en regulerbar dreiepute til å plassere på bilsete for å dreie og rotere 90 grader inn eller ut av bilsetet. Er et produkt av absolutt høyeste kvalitet. I Auto SLIDE er det innebygget et nett med cellestruktur, som gjør den luftventilerende og dermed forebygger at den blir varm å sitte på. Har regulerbar borrelås og kan justeres etter behov. Grunnet utformingen av den nederste glidedelen låser puten under kjøring. Auto SLIDE kan anvendes i alle typer bilseter også i baksetet. Er enkel å transportere og flytte rundt. Auto SLIDE TURNER leveres i Medium og Large.

(3) Auto SLIDE® BACK AIR

Består av en regulerbar dreiepute. Model BACK AIR er den absolutt eksklusive utgave av Auto SLIDE. Har overflate av nett med cellestruktur, som gjør den luftventilerende og dermed mere fast. Har håndtak i sider og godkjent sikkerhetslåsespenne av metall. Model BACK festes rundt bilsetets rygg. Den nederste glidedel er utformet slik, at glideputen låser under kjøring. Auto SLIDE BACK leveres i Medium og Large.

(2) Auto SLIDE® SEAT AIR

Består av en regulerbar dreiepute. Model SEAT AIR er den absolutt eksklusive utgave av Auto SLIDE. Har overflate av nett med cellestruktur, som gjør den luftventilerende og dermed mere fast. Har håndtak i sider og godkjent sikkerhetslåsespenne av metall. Model SEAT AIR festes rundt om selve setet. Den nederste glidedelen er utformet slik, at glideputen låser under kjøring. Auto SLIDE SEAT leveres i Medium og Large.

ADVARSEL

Dette hjelpemiddel må ikke forveksles med sikkerhetssele i en bil. Husk derfor alltid å bruke bilens sikkerhetssele under kjøring.

VIKTIG

Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjelpemiddel er intakt ved å jevnlig etterse sømmer. Hvis dette hjelpemiddelet har en kritisk slitasje eller på annet vis er skadet, må det ikke benyttes. Er du i tvil om bruken av dette hjelpemiddelet, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Ved feil eller uhensiktsmessig bruk av dette hjelpemiddelet, fraskrives ethvert ansvar for ulykker, som medfører alvorlige personskader.

Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark

 Master
Human Handling System

Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk

Produktbeskrivelse

Den Originale Auto SLIDE® kan anvendes til de fleste typer bilseter for å avlaste inn- og utstigning av bil.

Auto SLIDE® fås i flere varianter.


Auto SLIDE® består av to polstrede glideflater, som glir uavhengig av hverandre og er plassert permanent på bilsetet. Ved innstigning setter bruker seg på den øverste glidepute og kan dermed dreie og gli seg på plass i bilsetet. Når man strekker benene ut for å la dem hvile på forkant av setet vil Auto SLIDE® låses automatisk. Auto SLIDE® er en genial løsning som forebygger skader i hofter, rygg og kne mm. Tar ikke sittekomforten fra bilsetet.

Erfaringsmessig holdbarhet:

Min. 5 år

Vaskeanvisning

Auto SLIDE kan vaskes ved 80 grader C.

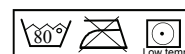

Det må ikke brukes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.



Max. brukervekt: 160 kg



Norge:

Arcus Vita As
Pb 213
5591 Etne

*Arcus
Vita as*

Tlf. 53 75 77 50
Epost: post@arcus-vita.no
www.arcus-vita.no

