

Master BELT

Aktiveringsbælte



BRUGERVEJLEDNING



DUO



Når mobiliteten forringes...

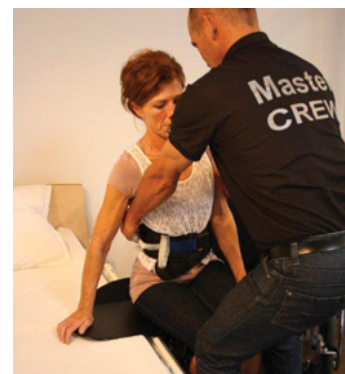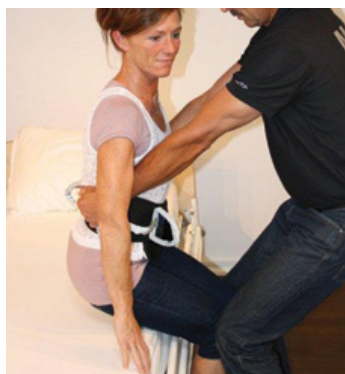

...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 003-1120	33237	Master BELT Multi Small	Velour	65 - 100 cm	L	320 g
	MC 003-1125	33238	Master BELT Multi Medium	Velour	80 - 120 cm	L	360 g
	MC 003-1126	33239	Master BELT Multi Large	Velour	95 - 130 cm	L	420 g
	MC 003-1127	42302	Master BELT Multi X-large	Velour	130 - 150 cm	L	420 g
	MC 003-1220	45645	Master BELT Multi Small	Non-Slip	65 - 100 cm	L	340 g
	MC 003-1225	45646	Master BELT Multi Medium	Non-Slip	90 - 120 cm	L	360 g
	MC 003-1226	45647	Master BELT Multi Large	Non-Slip	95 - 130 cm	L	440 g
	MC 003-1227	45648	Master BELT Multi X-large	Non-Slip	130 - 150 cm	L	500 g
	MC 003-1320	39019	Master BELT Small	DUO	60 - 100 cm	L	560 g
	MC 003-1325	39020	Master BELT Medium	DUO	70 - 120 cm	L	600 g
	MC 003-1326	39021	Master BELT Large	DUO	100 - 130 cm	L	660 g
	MC 003-1327	64535	Master BELT X-large	DUO	130 - 150 cm	L	700 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master BELT

Aktiveringsbælte

A. På- og afmontering af Master BELT



1A) Master BELT monteres rundt om brugerens talje. Master BELT fastgøres ved at benytte dets regulerbare låsespænde.




2A) For at tilpasse Master BELT til brugerens talje trækker man i selve bæltets ende - samtidig trækkes i modsatte retning i bæltets gjord i låsespændet. Der strammes til.




3A) For at afmontere Master BELT holder man tommelfinger øverst på låsespændet - samtidig trykker man den røde knap ind med pegefingeren.

B. Rejse bruger op fra siddende til stående i træningssituationer

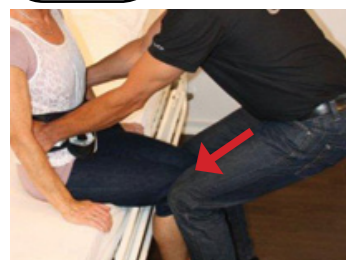


1B) Sørg for at brugeren har ståfunktion inden brugeren skal hjælpes op fra siddende til stående ved brug af Master BELT. Hjælperen stiller sig foran brugeren og støtter sine ben mod brugerens ben.

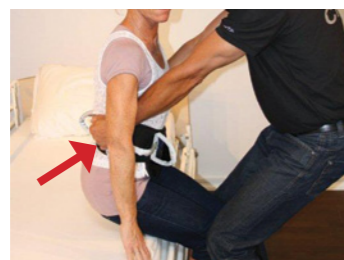

2B) Hjælperen griber fat i håndtag på begge sider af Master BELT, læner sig bagover ved hjælp af vægtoverføring, og rejser sig op samtidig med, at brugeren rejser sig.




3B) Brugeren er nu stående. Hjælper støtter ved fortsat at holde i håndtagene på Master BELT.

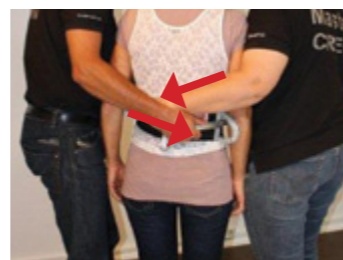

4B) Hvis brugeren er ustabil, bør man være to hjælpere. Hjælperne griber fat i håndtagene bag på Master BELT. Hjælperne krydser sine arme over hinanden.


C. Gangtræning

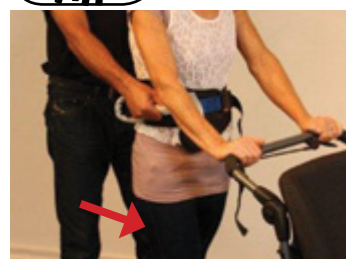

1C) Hjælper stiller sig bag ved bruger og holder i håndtag på Master BELT, mens bruger holder i håndtag foran i f.eks. rolator. Hvis bruger har bedre gåfunktion stiller hjælper sig ved siden af bruger, mens bruger holder i en stok eller gelænder i den modsatte hånd.



2C) Er der to hjælpere, griber begge hjælpere i håndtagene på Master BELT, således at hjælpernes arme krydser hinanden og støtter brugerens ryg.

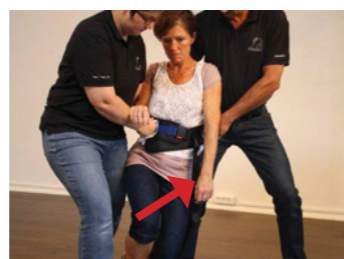

3C) **FORSØG ALDRIG PÅ AT HOLDE EN BRUGER DER FALDER. LAD I STEDET BRUGEREN GLIDE NED LANGS HJÆLPERENS BEN**


Master BELT

Aktiveringsbælte


D. Sætte bruger ned fra stående i træningssituationer




1D) Hjælper stiller sig foran brugeren og tager fat i håndtag på begge sider af Master BELT. Hjælperen finder en god arbejdsstilling.

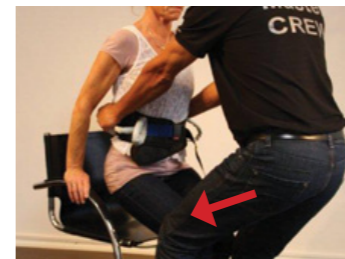

2D) Hjælper støtter med sit knæ mod brugerens og bøjer ned i knæene med ret ryg for at følge med brugerens bevægelse, når brugeren sætter sig ned i stolen.

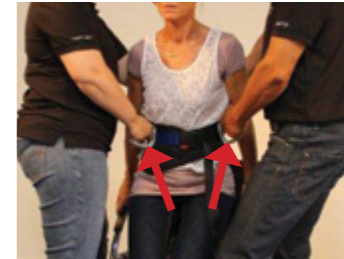


3D) Ved 2 hjælpere griber disse fat i håndtagene i hver sin side på Master BELT.

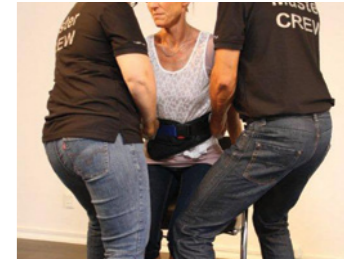


4D) Hjælperne krydser armene om bag brugerens ryg og sætter nu brugeren trygt ned. Hjælperne følger brugeren helt ned. Det er vigtigt at være opmærksom på arbejdsstillingerne.


E. Overflytning mellem kørestol og seng med 1 hjælper/2 hjælpere

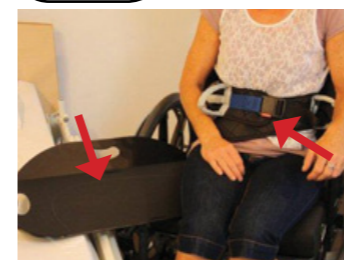

1E) Brugeren har et Master BELT monteret rundt om taljen, og der placeres et Master GLIDE Glidebræt mellem kørestol og seng.

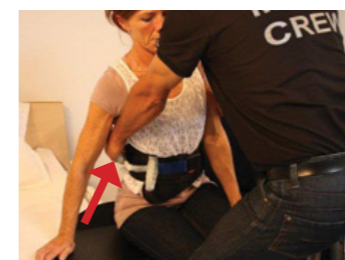

2E) Hjælper tager fat i håndtag i hver side på Master BELT, anvender vægtoverføring, og flytter nu brugeren i etaper over fra stol til seng.

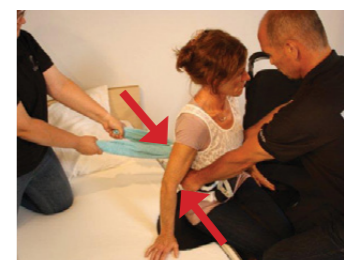

3E) 2 hjælpere. Den ene hjælper støtter brugeren foran og den anden støtter brugeren bagved ved f.eks. at trække et håndklæde gennem håndtag bag på Master BELT på modsatte side af sengen. Således bliver rækeafstanden ikke for lang.

F. Montering af Master BELT DUO



1F) Master BELT DUO monteres rundt om brugerens talje. Master BELT DUO fastgøres ved at benytte dets regulerbare låsespænde.



2F) For at tilpasse Master BELT DUO til brugerens talje trækker man i selve bæltets ende - samtidig trækkes i modsatte retning i bæltets gjord i låsespændet. Der strammes til.



3F) Benstropperne på Master BELT DUO monteres rundt om benet, og fastgøres ved at benytte det regulerbare låsespænde.



4F) Efterfølgende monteres den anden benstrop, og Master BELT DUO er nu monteret korrekt.

Master BELT

Vaskeanvisning

Master BELT kan vaskes
ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle-
eller blegemiddel.

Max. belastning

Max. belastning pr. håndtag: 35 kg
Max. belastning på låsespænde: 140 kg
Max. brugervægt: 140 kg

Bruger må ikke løftes i håndtagene.



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



ADVARSEL

- Forlad aldrig brugeren med dette hjælpemiddel påmonteret. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

Aktiveringsbælte

Produktbeskrivelse

Består af et polstret gå- og træningsbælte med en yderside af specielfremstillet nylon. Polstringen er af alveolit skum. Er fleksibelt og har vertikale og horisontale grebsvenlige runde håndtag i vævet polyester rørbånd. Har trinløs regulerbart låsespænde i hård plast, der sikrer en optimal tilpasning.

Model Velour har en velourbelagt skridsikker inderside.

Model Nonslip har en inderside af skridsikker PU-belagt elastisk polyster.

Master BELT DUO har en velourbelagt skridsikker inderside.

Endvidere er der påsyet bentrepper i vævet polyesterbånd, som sikrer, at bæltet ikke glider op på brugeren.

Anvendelse

Master BELT anvendes til brugere, der har behov for hjælp i forbindelse med siddende overflytninger samt hjælp og støtte ved gang. Master BELT giver hjælperen mulighed for at hjælpe brugeren til at rejse sig fra siddende til stående. Master BELT er et hjælpemiddel, der anbefales til træning f.eks. af gangfunktion.

Fordele

- Kan justeres, således at det tilpasses den enkelte bruger
- Er forsynet med flere grebsvenlige og ergonomiske håndtag
- Benstroppeperne forhindrer Master BELT DUO i at glide op på brugeren