

KRYCKKÄPP FLEX ERGO, GRÅ

Artikelnummer: 127200, 127250, 127300, 127350, 127400, 127450, 127500, 127550, 127600, 127650

Avsedd användning:


Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

⚠ Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall anpassas till respektive brukares särskilda behov och justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt).
- Använd ej för stor kraft när skruven för handtagsjusteringen skruvas åt. Använd endast handkraft då skruven annars kan gå av.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Angiven max brukarvikt gäller även vid användning av två kryckkäppar.



127200, 127250

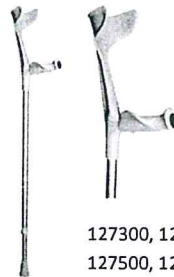

127300, 127350,
127500, 127550



127400, 127450,
127600, 127650

Teknisk specifikation

<p>Art nr: 127200 Rak, mjuk</p> <p>Max vikt: 140 kg Ställbar höjd: 75-97cm Vikt: 0,55 kg</p>	<p>Art nr: 127250 rak, mjuk, lång</p> <p>Max vikt: 120 kg Ställbar höjd:90-112cm Vikt: 0,62 kg</p>	<p>Art nr: 127300 Ergo, höger</p> <p>Max vikt: 140 kg Ställbar höjd: 75-97cm Vikt: 0,56 kg</p>	<p>Art nr: 127350 Ergo, höger, lång</p> <p>Max vikt: 120 kg Ställbar höjd:90-112cm Vikt: 0,63 kg</p>	<p>Art nr: 127400 Ergo, höger, mjuk</p> <p>Max vikt: 140 kg Ställbar höjd: 75-97cm Vikt: 0,56 kg</p>
<p>Art nr: 127450 Ergo, höger, mjuk, lång</p> <p>Max vikt: 120 kg Ställbar höjd:90-112cm Vikt: 0,64 kg</p>	<p>Art nr: 127500 Ergo, vänster</p> <p>Max vikt: 140 kg Ställbar höjd: 75-97cm Vikt: 0,56 kg</p>	<p>Art nr: 127550 Ergo, vänster, lång</p> <p>Max vikt: 120 kg Ställbar höjd:90-112cm Vikt: 0,63 kg</p>	<p>Art nr: 127600 Ergo, vänster, mjuk</p> <p>Max vikt: 140 kg Ställbar höjd: 75-97cm Vikt: 0,56 kg</p>	<p>Art nr: 127650 Ergo, vänster, mjuk, lång</p> <p>Max vikt: 120 kg Ställbar höjd:90-112cm Vikt: 0,64 kg</p>

Material: Aluminiumrör, PA (överdel), TPE (handtag mjukt) PP (handtag hårt), naturgummi (doppskon)

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.




Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se

Användning:

1. Justera höjden för kryckkåppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkåpens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren och bör anvisas av sjukgymnast/förskrivare.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkåppen genast avbrytas och produkten skickas in för service.
3. Vinkeln på handtagets anläggningsyta går att justera genom att lossa handtagsskruven och dra av handtaget. Använd en femkrona eller annat lämpligt verktyg. Vrid till önskad vinkel och för på handtaget igen. Fäst skruven i handtaget. Använd endast handkraft och dra inte åt för hårt. Skruven kan gå av vid för kraftig dragning.
4. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

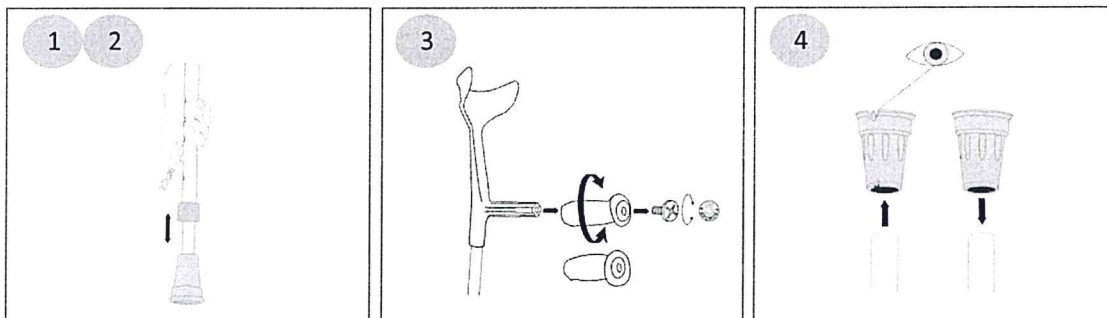

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Vid rekonditionering bör doppskon bytas ut mot en ny. Nya doppskor beställs från Swereco.

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets
 Art. nr 123350, Isdubb kronan
 Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar
 Art. nr 124885, Kåpphållare FLEX
 Art. nr 124889, Gummifot Stabil
 Art. nr 124900, Flexyfoot

Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko
 Art. nr 12720002, Handtag rakt, mjukt
 Art. nr 12730002, Handtag höger, hårt
 Art. nr 12740002, Handtag höger, mjuk
 Art. nr 12730003, Kryckskruv
 Art. nr 12750002, Handtag vänster, hårt
 Art. nr 12760002, Handtag vänster, mjukt

3127200