

Brukerveiledning

Glidelaken Stretch

FOR SENG BREDDE 80—90 cm:



Art. 1090
Glidelaken Stretch 90

HMS nr 134775
Glideflaten: B70xL130 cm



FOR SENG BREDDE 120 cm:



Art. 1094
Glidelaken Stretch 120

HMS nr 149393
Glideflaten: B100xL130 cm




FOR BRED SENG BREDDE 150cm:



Art. 1092
Glidelaken Stretch 150

HMS nr. 147044
Glideflaten: B130xL130 cm

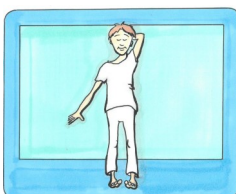


FOR SENG BREDDE 180 cm:



Art. 1096
Glidelaken Stretch 180

HMS nr 174248
Glideflaten: B150xL130 cm

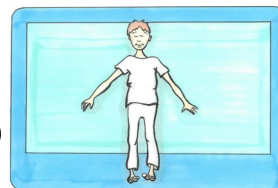

KOMBINASJONER:



Art. 1091 Glidelaken Stretch 90 m/stikklaken
HMS art nr. 164427

Pakke med art 1090 og art 1010



Art. 1095 Glidelaken Stretch 120 m/stikklaken
HMS art nr. 184498

Pakke med art 1094 og art 1010

Bruksområde

Glidelaken Stretch er et hjelpemiddel for å nedsette friksjonen under vending i seng slik at det blir lettere for pasienten å snu seg i sengen.


Brukere som kan snu seg selv ved hjelp av den nedsatte friksjonen skal ligge direkte på glidelakenet.

Brukere som allikevel trenger hjelp til vending og stell i seng kan bruke glidelaken i kombinasjon med Stikklaken 2-veis eller Stikklaken 4-veis. Stikklakenet plasseres da oppå glidelakenet.

Plassering *Glidelaken Stretch*


Glidelaken Stretch plasseres i sengen med glideflaten opp. Merkelappen som anviser: **DENNE SIDE OPP OG I HODEENDE**, skal ligge midt i sengen i hodeenden. Pass på at glideflaten ikke går ut over sengekanten, det medfører fare for fall ut av seng.

Glidelaken Stretch erstatter også det vanlige lakenet slik at man ikke trenger dette.

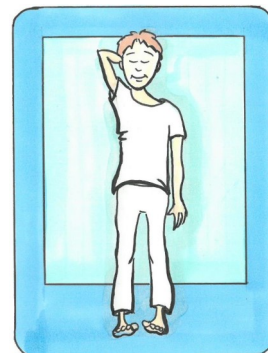

Plassering Stikklaken


Ved eventuelt bruk av stikklaken plasseres dette oppå **Glidelaken Stretch** og brukeren ligger oppå der igjen. Se illustrasjonen til høyre

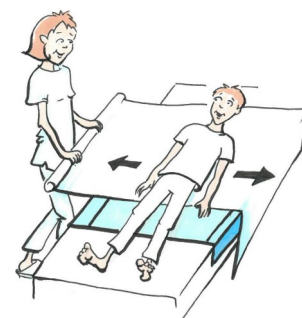

Stikklaken 2-veis

Anvendelse *Glidelaken Stretch*

Brukeren ligger direkte på *Glidelaken Stretch* og kan ved hjelp av den nedsatte friksjonen lettere snu seg i sengen.

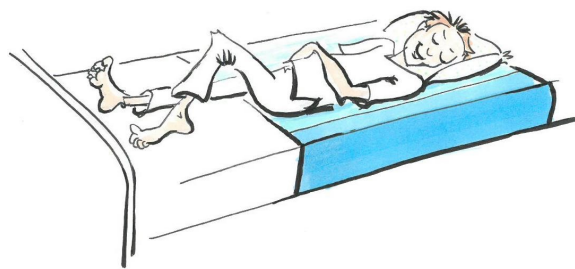

Anvendelse Stikklaken

Vending med stikklaken foretas ved å gripe fatt i stikklakenet ved skuldre og hofte. Hev sengen slik at den laveste pleieren får en god arbeidsstilling. Arbeid med strake h ndledd og bruk vektoverf ring. Er man 2 pleiere kan den ene trekke i stikklakenet samtidig som den andre skyver forsiktig ved skuldre og hofter.

Er pasienten urolig og beveger seg mye i l pet av natten b r ogs  sengehesten v re oppreist slik at det ikke oppst r fare for fall ut av seng. Dette er spesielt viktig ved bruk av 4-veis stikklaken.




Sikkerhet!

- ⇒ P se at glidelakenet alltid ligger midt i sengen og at glidefeltet ikke g r ut over kanten av sengen.
- ⇒ N r man forlater pasienten p  et glidelaken med stikklaken skal alltid det overskytende stoffet p  sidene av stikklakenet foldes godt innunder madrassen.
- ⇒ N r man forlater pasienten p  et 4-veis stikklaken skal det alltid vurderes om sengehesten skal v re oppreist for   unng  fall ut av sengen.
- ⇒ Forlat aldri pasienten sittende alene p  sengekanten.

Vasker d

- Stryking av glideflaten forbedrer glideevnen.
- Bruk ikke skyllemiddel.

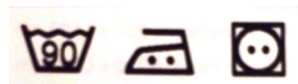

Materiale

- Glidefelt: 100 % polyester
- Sidefelt: 95% bomull, 55% lycra





www.arcus-vita.no

Pb 213
5591 Etne

Telefon: 53 75 77 50
Telefaks: 53 75 77 51
E-post: post@arcus-vita.no