

Master BOARD

Multi Medium og Large

BRUGERVEJLEDNING



Master BOARD Mutli Medium



Master BOARD Multi Large



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 005-1270	55316	Master BOARD Medium	Multi	L 110 x B 50 cm	L	1860 g
	MC 005-1071	34173	Master BOARD Nyloncover 50	Medium	L 110 x B 54 cm	L	100 g
	MC 005-1310	43299	Master BOARD Large	Multi	L 180 x B 50 cm	L	2980 g
	MC 005-1211	38948	Master BOARD Nyloncover 50	Large	L 180 x B 54 cm	L	160 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master BOARD

Multi Medium og Large

A. Forberedelse af Master BOARD Multi Medium



1A) Master BOARD Multi Medium foldes ud.



2A) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD Multi Medium.



3A) Master BOARD Multi Medium er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages SKAL hjul på begge lejer låses.

B. Anvendelse af Master BOARD Multi Medium



1B) Vend brugeren om til den ønskede side.



2B) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending.



3B) Mens den ene hjælper holder brugeren i sideleje, placerer den anden hjælper Master BOARD Multi fra hovedet og nedefter til hofteparti. Vær opmærksom på at boardet dækker helt op til brugerens isse, da hovedet ellers vil blive voldsomt roteret under overflytningen.



4B) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Master BOARD Multi, således det dækker øverste halvdel af brugerens krop.



5B) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD Multi. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6B) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD Multi påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD Multi ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælperes hjælp flytter benene med.



7B) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD Multi. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Multi Medium og Large

C. Forberedelse af Master BOARD Multi Large



1C) Master Board Multi Large foldes ud



2C) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD Multi Large.



3C) Master BOARD er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages SKAL hjul på begge lejer låses.

D. Anvendelse af Master BOARD Multi Large



1D) Vend bruger om til den ønskede side.



2D) Hvis muligt anvend gerne et lagen til vendingen.



3D) Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper Master BOARD multi, således at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofte- og benparti.



4D) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Master BOARD Multi. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på Master BOARD Multi.



5D) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD Multi. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6D) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD Multi påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD Multi ruller med brugeren.



7D) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD Multi. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Vaskeanvisning

Master BOARD Multi kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL


Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Produkterne kan renses med hospitalssprit og hospitalsklorin.

Max. belastning

Medium og Large:

Personvægt: max 160 kg
Afstand mellem flyttepunkter: max 20 cm

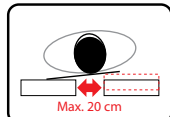

Personvægt: 160 kg



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Til opbevaring af Master BOARD Multi



MC 002-1284
Master RACK Folie Holder



MC 002-1282
Master RACK
Vægophæng

Multi Medium og Large

Produktbeskrivelse

Master BOARD Multi er et overflytningsboard opdelt i sektioner, der gør Boardet fleksibelt. Master BOARD Multi er et polstret afstivet overflytningsboard, der består af fleksible plastplader fremstillet i opskummet PVC. Master Boardet kan skilles ad og vaskes. Udenpå Master BOARD Multi anvendes som tilbehør et cover af nylon, som roterer og glider mod Boardet. Derved skabes en rullende bevægelse under bruger.

Master BOARD Multi Medium er et 5-punkts Board, som dækker hofte-, skulder og hovedparti. Her kan brugeren enten selv flytte benene, eller hjælper flytter disse.

Master BOARD Multi Large er et 7-punkts Board, som dækker hele kroppens længde.

Udover det medfølgende nyloncover kan Master BOARD Multi forsynes med engangsovertræk, der er bestående af en glat folie, som har unikke glideegenskaber. Master BOARD Multi kan foldes sammen som en harmonika og kan under opbevaring hænges op på Master RACK Vægophæng eller stå i Master RACK Folie Holder og fylder derved minimalt med plads.

Anvendelse

Master BOARD Multi anvendes til liggende eller halvt siddende overflytninger mellem seng, leje, hvilestol, kørestol der kan lægges ned mm. Master BOARD Multi bygger bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle. Boardets udformning gør, at det tilpasser sig underlaget ved overflytning, hvor brugeren f.eks. sidder halvt op i en seng eller stol.

Fordele

- Nemt at placere
- Nedsætter friktion ved overflytning mellem lejer
- Udligner højdeforskelle
- Kan anvendes til halvt siddende overflytninger

Engangsovertræk til Master BOARD Multi



MC 002-1263
Junior/Medium Rød



MC 002-1262
Junior/Medium Klar

MC 002-1252
Large Rød

MC 002-1251
Large Klar

Til opbevaring af Master BOARD Engangsovertræk



MC 002-1284
Master RACK Folie Holder



MC 002-1280
Master RACK Vægstativ