


Roll BOARD Vision BRUGERVEJLEDNING

Ambulance

PETERMANN
Hilfsmittel für immobile Menschen




Når mobiliteten forringes...

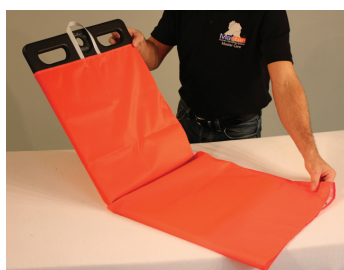


...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	PMF 9075	80404	Roll BOARD Vision Inkl. Cover af Nylon	Ambulance	L 85 x B 45 cm	640 g
	PMF 9076	80960	Roll BOARD Vision Nyloncover	Ambulance	L 86 x B 47 cm	100 g


Roll BOARD Vision Ambulance

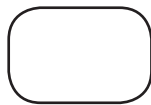

A. Forberedelse af Roll BOARD Vision Ambulance

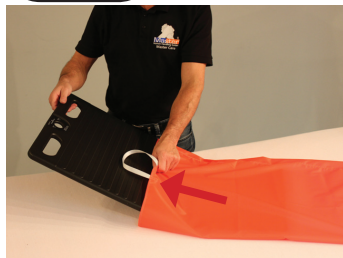

1A) Det vedlagte cover af nylon føres over Roll BOARD Vision Ambulance.

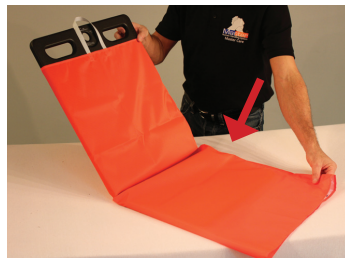

2A) Roll BOARD Vision Ambulance er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages SKAL hjul på begge lejer låses.



B. Anvendelse af Roll BOARD Vision Ambulance



1B) Vend brugeren om til den ønskede side.



2B) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending.



3B) Hjælper 1 holder brugeren i sideleje, hjælper 2 placerer Roll BOARD Vision Ambulance fra hovedet og nedefter til hofteparti. Boardets korte flade skal være under brugerens bækkenparti.



4B) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Roll BOARD Vision Ambulance, således det dækker øverste halvdel af brugerens krop.



5B) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Roll Board Vision Ambulance. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6B) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Roll BOARD Vision Ambulance påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Roll BOARD Vision Ambulance ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælpers hjælp flytter benene med.



7B) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i boardets håndtag på Roll Board Vision Ambulance. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Roll BOARD Vision Ambulance

Tilbehør til Roll BOARD Vision

Til opbevaring af Roll BOARD Vision



Art. nr. MC 002-1285
Master RACK Board Holder



Art. nr. MC 002-1283
Knage

Engangsovertræk til Roll BOARD Vision



Art. nr. MC 002-1500
Engangsovertræk i løbende meter



Art. nr. MC 002-1510
Perforeret Engangsovertræk

Til opbevaring af Engangsovertræk



Art. nr. MC 002-1284
Master RACK Folie Holder



Art. nr. MC 002-1280
Master RACK Vægstativ med
2 bøjler

Roll BOARD Vision Ambulance

Vaskeanvisning

Roll BOARD Vision Ambulance

Aftørres med en fugtig klud.

Anvend varmt vand og mild vaskemiddel.

Nyloncover

kan vaskes ved 60° C



Kun skånsom tørretumbling 45-50° C



ADVARSEL

Roll BOARD Vision

Anvende ikke slibende midler eller blegemidler og skarpe genstande på boardet.

Nyloncover

Der må ikke anvendes blegemidler, skyllemiddel eller andre kemiske tilsætningsstoffer, da dette forringer glideeffekten på coveret

Tåler ikke:


- Alkoholiske og aldehyd-holdige rensningsmidler
- Autoklave

Max. belastning

Personvægt: max 200 kg

Afstand mellem flyttepunkter:

max 15 cm

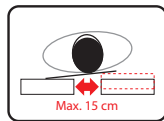

Personvægt: 200 kg



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Roll BOARD Vision er et helt nyudviklet og patenteret overflytnings Board, som består af en formstøbt opskummet polyethylenplade.

Roll BOARD Vision Ambulance er et 5 punkts board, som dækker hofter, skulder og hovedparti. Her kan brugeren selv flytte benene. Udenpå Roll BOARD Vision Ambulance anvendes som tilbehør et hylster af nylon, som roterer og glider mod Boardet. Derved skabes der en rullende bevægelse under brugeren. For ekstraordinære hygiejniske krav kan Roll BOARD Vision forsynes med éngangsovertræk, der er bestående af en glat folie, som trækkes udenpå nyloncoveret.

Anvendelse

Roll BOARD Vision Ambulance anvendes til liggende eller halvt siddende overflytninger mellem seng, leje, hvilestol, eller kørestol som kan lægges ned. Det unikke ved Roll BOARD Vision Ambulance er, at det bygger bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle f.eks overflytning, hvor personen sidder halvt op. Roll BOARD Vision lever op til de hygiejniske krav, der stilles og er med sin formstøbte udformning let at rengøre. Endvidere er Boardet nemt at håndtere med sin lave vægt. Under opbevaring kan Roll BOARD Vision Ambulance hænges op på Master RACK Knage eller stå i Master RACK Board Holder og fylder derved minimalt med plads. Roll BOARD vision Ambulance er specielt udviklet til anvendelse i ambulancer, da boardet har et knæk, og derved kan anvendes til siddende overflytninger.

Fordele

- Er let at rengøre
- Har lav vægt
- Er let at placere samt fjerne igen under bruger
- Leveres med formsyet glidecover
- Kan endvidere forsynes med éngangsovertræk
- Er specialudviklet til brug i ambulancer