

GØR LIVET TIL EN LEG - LAD FODEN GLID´ I FOR DIG

GLID DIN FOD I SKOEN MED MASTER CARE GLIDESTOF



1 Fold glidestykket 2/3, så det øverste stykke er kortere end det nederste.



2 Læg det dobbeltlagte glidestof ned i skoens.



3 Kanten af glidestoffet skal ligge 8-10 cm fra snuden, så glidestoffet ikke kommer omkring tåen.



4 Stik foden ned i skoens og træd ned på glidestoffet. Hold evt. igen på det nederste stykke.


FJERNE GLIDESTOF FRA SKO



5 Nu er foden helt i skoens



6 Fjern glidestoffet ved at trække i det nederste stykke.

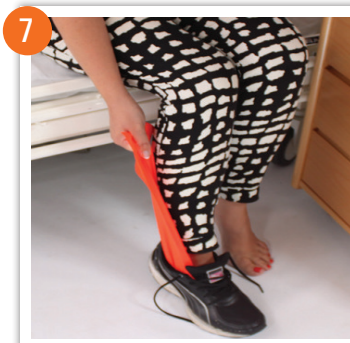

7 Træk til glidestoffet er helt ude af skoens.



8 Glidestoffet er nemt at tage med sig i lommen eller i en taske.

MASTER CARE GLIDESTOF

MARKEDETS BEDSTE GLIDEEGENSKABER

Glidestof fra master **care** A/S er af specialfremstillet nylon af højeste kvalitet. Det er lydsvagt og tåler gentagne vaske uden at miste glideevnen. Vi leverer både i metermål og i rulle ved køb af minimum 100 m.

Se hele vores produktsortiment på www.master-care.dk

Sort og orange

HLF

Hyper Low Friction

mi mastercare®
HUMAN HANDLING SYSTEM